

7. Garantie

Le déambulateur FORTA est garanti un an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale ni la casse de votre déambulateur FORTA.

Toute modification du déambulateur ou adjonction non expressément autorisée par Forta est interdite et annule de fait la garantie.

Toute réparation, hormis le remplacement des éléments d'usure (roues, embouts, poignées et clips) par un technicien qualifié spécialiste du matériel médical, annule la garantie et dégage Forta et son représentant Orthinea de toute responsabilité en cas d'accident.

8. Responsabilité

Un déambulateur ne constitue qu'une aide, au même titre que l'ABS d'une voiture. Il appartient à l'utilisateur, à son entourage et à l'équipe thérapeutique de connaître les limites physiques de l'utilisateur, d'assurer une surveillance constante pendant l'utilisation et de s'assurer que le déambulateur choisi correspond bien aux capacités physiques de l'utilisateur.

Par exemple, un utilisateur avec une très mauvaise qualité de marche ne peut pas utiliser un déambulateur disposant de roues aux 4 pieds. Son cas peut même relever d'un autre type d'aide à la marche (Dynawalk, Movita ou autre).

Forta et son représentant Orthinea ne sauraient être tenus pour responsables en cas d'accident ou de chute survenant pendant l'utilisation d'un déambulateur.

9. Certification de conformité

La société FORTA certifie tous ses produits conformes à la norme CE 93/42/EEG.

10. Destruction et recyclage

Le déambulateur FORTA hors d'usage doit être sorti un jour de collecte d'encombrants ou jeté en déchetterie dans la benne « métaux ». Dans certaines communes, il peut être jeté dans la poubelle jaune destinée aux déchets recyclables. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

Notice des déambulateurs FORTA



102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	

Notice des déambulateurs FORTA

1. Domaine d'utilisation

Votre déambulateur FORTA est destiné à une utilisation normale de déambulateur. Il est destiné à servir à une seule personne à la fois. Il est destiné à servir en intérieur uniquement. Une utilisation en extérieur est possible si l'environnement est aménagé aux normes définies pour le passage des personnes à mobilité réduite. Il doit être utilisé sous la surveillance d'une tierce personne en mesure d'assurer le bon déroulement de la déambulation.

Le poids maximum de l'utilisateur est de 100Kg pour les modèles AIR, RollARA et Rollatiño, 125Kg pour les modèles CAR, 130K pour les modèles Kanguro et ARA-Plus et 150Kg pour les modèles ARA et les cadres de marche sans roue.

Les déambulateurs FORTA sont trop légers pour permettre l'ajout d'accessoires du type parapluie ou porte-sérum ORTHINEA. Le poids de ces accessoires pourrait faire chuter les déambulateurs. De manière générale, ne modifiez pas les déambulateurs FORTA et n'ajoutez aucun appareil dessus sans accord écrit d'ORTHINEA.

2. Vérification

A réception de votre déambulateur FORTA et avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

- fonctionnement du mécanisme d'ouverture du déambulateur
- présence de tous les éléments, notamment des clips ou vis maintenant les poignées
- bon état de l'ensemble : les pieds et les roues sont tous en contact avec le sol et aucun élément n'est manifestement manquant, tordu ou endommagé.

En cas de doute, contactez votre revendeur.

3. Mise en service

Votre déambulateur FORTA est livré prêt à servir. Dépliez-le et verrouillez-le en position ouverte de la manière suivante :

- AIR et Rollatiño : passez le petit clip arrondi situé en haut et à droite derrière le tube qui tient la poignée droite. Un petit clic doit se faire entendre.
- CAR : abaissez au maximum les 2 tubes reliant l'avant du cadre au bas des 2 pieds arrière
- ARA et RollARA : abaissez l'assise jusqu'à l'emboîter sur le tube transverse situé le plus en arrière. Un petit clic doit se faire entendre.

Appuyez fortement sur les poignées pour vous assurer que le déambulateur est bien stable et en ordre de marche.

4. Utilisation

Appuyez-vous autant que nécessaire sur les poignées. Pour faire avancer le déambulateur, levez les pieds arrière pour le faire rouler sur ses roues avant. Les modèles avec roulettes arrière et freins automatiques demandent seulement à relâcher un peu la pression sur les poignées pour avancer.

ATTENTION ! RISQUE DE CHUTE ! N'utilisez jamais un déambulateur dont un élément est manquant, tordu ou endommagé ! N'improvisez pas de réparation (par exemple redresser un tube tordu) et n'utilisez jamais un déambulateur réparé.

Les déambulateurs Forta ne sont pas réparables. Si une réparation est nécessaire, il faut remplacer le déambulateur. Seuls les éléments d'usure (roues, embouts, poignées et clips) peuvent être remplacés par un technicien qualifié spécialiste du matériel médical.

5. Accessoires

Tablette : elle est destinée à être emboîtée sur les transverses des AIR et Rollatiño (la tablette sur la transverse haute et les petits bras gris clair sur la transverse située immédiatement en dessous). Elle ne doit pas servir de siège, ni servir à transporter des objets trop fragiles pour résister à une chute éventuelle depuis la hauteur de la tablette. Elle ne doit pas être utilisée pour transporter des appareillages médicaux (bouteille d'oxygène, par exemple).

Panier : il est destiné à être accroché sur la transverse haute des AIR et Rollatiño. Il ne doit pas servir de siège, ni servir à transporter des objets trop fragiles pour résister à une chute éventuelle depuis la hauteur du panier. Il ne doit pas être utilisé pour transporter des appareillages médicaux (bouteille d'oxygène, par exemple).

Poignées mousse et poignée en arc : elles sont destinées à remplacer les poignées anatomiques livrées de série. Démontez les poignées anatomiques et défaisant les clips ou vis qui les maintiennent. Installez les poignées mousse en les fixant avec les mêmes clips ou vis et de la même façon que les poignées anatomiques.

6. Entretien

Un entretien soigné de votre déambulateur FORTA augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre déambulateur FORTA avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre déambulateur FORTA après chaque sortie pour prévenir l'oxydation.

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400013 APE 3250A	