

Notice de l'Adventus



CE

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48		
TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400039	APE 3250A	TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400039	APE 3250A

Notice de l'Adventus

ORTHINEA vous remercie d'avoir choisi un de ses produits. L'Adventus est un produit de grande qualité, fabriqué en Suède par la société Decon Wheels AB. Il va étendre énormément votre autonomie en fauteuil roulant. Ne le réservez pas qu'au tout-terrain : vous serez étonné par ses avantages en ville !

1. Domaine d'utilisation

Votre Adventus est destiné à être fixé sur un fauteuil roulant à repose-pieds rigide, dans le cadre d'une utilisation normale de fauteuil roulant à propulsion manuelle. Il est destiné à transporter une seule personne dans un environnement adapté.

Le repose-pieds doit être suffisamment solide pour supporter les efforts de torsion induits par l'Adventus. Sur les fauteuils roulants Panthera, il vous faut un repose-pieds renforcé en titane (charge maxi 100Kg). Sur les autres marques, merci de consulter le fabricant ou son importateur officiel.

2. Vérification

À réception de votre Adventus, vérifiez les points suivants :

- . bon état de l'ensemble et gonflage de la roue (2 bars maximum).
- . présence de toutes les pièces : support en aluminium noir, 3 paires d'attaches, 4 vis et 4 écrous.

En cas de doute, contactez votre revendeur.

3. Montage

a. Choix des attaches

Séparez les 3 paires d'attaches en fonction des 3 tailles de leurs évidements.

Choisissez la paire d'attaches dont les évidements correspondent le mieux aux tubes du repose-pieds.

b. Installation

Positionnez le support en aluminium noir sur les tubes du repose-pieds. La partie avec deux trous vers l'avant et la partie avec deux fentes vers l'arrière.

Passez deux vis dans les deux trous avant et positionnez l'attache choisie sous le tube en passant les deux vis dedans.

Vissez à la main les écrous en bas des vis.

Procédez de la même façon pour le tube arrière en passant les vis dans les fentes du support, de part et d'autre du tube arrière.

Lorsque les 4 vis et écrous sont en place et serrés à la main, commencez le serrage avec des outils adaptés.

Avant de tout bloquer, centrez très précisément le support au milieu du repose-pieds en vous aidant d'un mètre ou d'une règle. Finissez le serrage en symétrisant la position des écrous sur les 4 vis.

Si les vis s'avèrent trop longues, vous pouvez les recouper à ras des écrous ou les remplacer par des vis plus courtes, de même diamètre, en acier ou en inox (pas d'aluminium ou autre matériau fragile).

c. Cas des repose-pieds à tube unique avec une plaque rapportée

Choisissez une attache correspondant au tube unique.

Installez le support en aluminium noir en ne fixant dans un premier temps que l'avant. Percez si nécessaire au diamètre 6mm à travers la plaque repose-pieds en vous servant du support noir comme guide.

Avant de percer, contrôlez plusieurs fois très précisément le centrage du support au milieu du repose-pieds en vous aidant d'un mètre ou d'une règle.

Vissez ensuite l'arrière du support à la plaque repose-pieds en perçant si nécessaire au diamètre 6mm à travers la plaque repose-pieds en vous servant du support noir comme guide. Ne positionnez pas vos trous à moins de 5mm d'un bord ou d'un évidement de la plaque repose-pieds.

Vissez l'arrière du support en ajoutant des rondelles au-dessus des écrous. Les vis seront trop longues, vous pouvez les recouper à ras des écrous ou les remplacer par des vis plus courtes, de même diamètre, en acier ou en inox (pas d'aluminium ou autre matériau fragile).

d. Hauteur de l'Adventus

. Desserez d'un seul tour les vis situées dans les ouvertures de chaque côté de l'Adventus.

. Réglez la hauteur en tournant la vis située sur le dessus de l'Adventus, à la base du levier de verrouillage. Ne jamais défaire les vis entièrement. Aucune vis de l'Adventus n'est destinée à être enlevée.

. Pour obtenir la bonne hauteur, placez l'Adventus en position de marche arrière et serrez la vis de réglage jusqu'à décoller les roues avant du fauteuil roulant de 5mm environ au-dessus du sol. Ces roues doivent à nouveau toucher le sol lorsque l'utilisateur s'assied dans le fauteuil roulant. Lorsqu'on s'assied dans le fauteuil roulant, l'Adventus doit pouvoir être mis en place et verrouillé sans soulever l'avant du fauteuil roulant.

4. Utilisation

e. Mise en place (voir vidéo sur le site www.orthinea.com)

. Pivotez la roue de l'Adventus en position de marche arrière.

. Placez la mâchoire de l'Adventus entre les pieds, sur le support noir, en engageant d'abord l'arrière puis en posant l'avant de la mâchoire.

. Abaissez le levier pour verrouiller la mâchoire.

f. Démarrage

Déplacez le fauteuil roulant vers l'avant en tournant légèrement pour replacer la roue de l'Adventus en position de marche avant, ce qui a pour effet de soulever les roues avant du fauteuil roulant du sol.

g. Démontage et transport

Replacez la roue de l'Adventus en position de marche arrière et levez le levier de verrouillage pour ouvrir la mâchoire.

Attention : accrocher l'Adventus ou le transporter dans un sac pris sur le dossier de votre fauteuil roulant modifie l'équilibrage du fauteuil roulant ! Veillez à modifier l'équilibrage du fauteuil roulant ou ajouter au moins un dispositif anti-bascule pour ne pas chuter vers l'arrière !

5. Entretien

Un entretien soigné de votre Adventus augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le gonflage du pneu et le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre Adventus avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre Adventus après chaque sortie pour prévenir l'oxydation. Utilisez fréquemment un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.

6. Garantie

L'Adventus est garanti 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre Adventus (par exemple usure du pneu). Elle ne couvre pas la casse d'un repose-pieds trop fragile pour recevoir l'Adventus. Il vous appartient de vérifier que le fabricant du fauteuil roulant autorise l'utilisation de l'Adventus sur ses modèles.

7. Certification de conformité

La société Decon Wheels AB certifie que son produit est conforme à la norme CE 93/42/EEG.

8. Destruction et recyclage

L'Adventus hors d'usage doit être sorti les jours de collecte d'encombrants ou jeté en déchetterie. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794	SIRET 50507679400039	APE 3250A	TVA Intra. FR 87505076794
SIRET 50507679400039		SIRET 50507679400039	
APE 3250A		APE 3250A	



Bon de garantie de votre Adventus

N° de série du fauteuil roulant :

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison ORTHINEA :

Date limite de validité de la garantie :

Les accessoires ORTHINEA tels que l'Adventus sont garantis 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA.
La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre Adventus (par exemple usure du pneu).
Les pièces échangées au titre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu'à la date limite de la garantie d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



Partie à retourner complétée à Orthinea :

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tél. : 01 69 07 61 13 Fax : 01 64 46 25 48
TVA Intra. FR 87505076794 SIRET 50507679400039 APE 3250A	

www.orthinea.com