

#### 4. Entretien

Un entretien soigné de votre fauteuil roulant PANTHERA augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le gonflage des pneus et le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre fauteuil roulant PANTHERA avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles. Enlevez tout cheveu enroulé sur les axes des roues avant pour conserver les qualités de roulage de votre fauteuil roulant PANTHERA.

Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre fauteuil roulant PANTHERA après chaque sortie pour prévenir l'oxydation. Utilisez fréquemment un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles. Si vous défaites des visseries, mettez de la résine anti-desserrage avant de les réinstaller.

#### 5. Garantie

Les fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison PANTHERA. Cette garantie est de 1 (un) an en dehors du territoire français. Les châssis des fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 5 (cinq) ans.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant PANTHERA (par exemple usure des pneus ou des bandages), ni une casse (volontaire ou non) qui ne soit pas directement liée à un défaut de fabrication ou de matériau.

Toute modification ou adjonction au fauteuil roulant PANTHERA qui n'aurait pas été réalisée par PANTHERA ou ORTHINEA n'est pas couverte par la garantie.

#### 6. Certification de conformité

La société PANTHERA PRODUCTION AB certifie que ses fauteuils roulants sont conformes à la norme CE 93/42/EEG.

#### 7. Destruction et recyclage

Les fauteuils roulants PANTHERA hors d'usage doivent être sortis les jours de collecte d'encombrants ou jetés en déchetterie. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

## Notice des fauteuils roulants PANTHERA



102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400013   APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400013   APE 3250A	

## 1. Domaine d'utilisation

Votre fauteuil roulant PANTHERA est destiné à une utilisation normale de fauteuil roulant à propulsion manuelle. Il est destiné à transporter une seule personne dans un environnement adapté.

## 2. Vérification

À réception de votre fauteuil roulant PANTHERA, vérifiez les points suivants :

- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande.
- dossier : il doit se plier facilement.

Avant chaque utilisation de votre fauteuil roulant PANTHERA, vérifiez les points suivants :

- roues arrière : le système de démontage rapide doit fonctionner aisément et verrouiller automatiquement lorsqu'on met chacune des roues en place. Tirez sur le moyeu de chaque roue pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée. N'utilisez jamais un fauteuil roulant dont un axe de roue ne verrouille pas correctement.
- fourches : elles doivent tourner librement sur leurs axes.
- freins : ils doivent bloquer efficacement votre fauteuil roulant sans être trop durs à manipuler.

En cas de doute, contactez votre revendeur et faites réaliser sans attendre les réglages nécessaires.

## 3. Utilisation

### a. Démontage des roues arrière

Appuyez sur le bouton au centre de la roue et tirez-la vers vous. Pour la remettre en place, appuyez sur le bouton, insérez l'axe dans l'essieu, poussez la roue à fond contre l'essieu et relâchez le bouton. Tirez sur la roue pour vérifier que l'axe s'est bien verrouillé automatiquement.

### b. Pliage du dossier

Saisissez le câble situé à l'arrière de l'assise. Tirez-le en arrière pour déverrouiller le dossier. Pour le U3 Light et le X, enlevez les protège-vêtements pour déverrouiller le dossier.

### c. Tension des toiles

La tension des toiles d'assise et de dossier est réglable. L'accès se fait sous le fauteuil pour la toile d'assise et en levant l'arrière de la toile de dossier pour le dossier.

### d. Hauteur du ou des repose-pied(s)

La hauteur se règle de chaque côté par une vis située à mi-hauteur de l'avant du châssis. Utilisez une clé BTR à 6 pans de 3mm pour faire le réglage. Attention : utilisez une clé de bonne qualité (grande marque – Facom, Wiha, Stanley, Würth, etc.) pour ne pas endommager les vis et **ne serrez pas trop**.

### e. Angle du dossier

L'angle du dossier est réglable à volonté. Il y a 2 systèmes de réglage situés en bas des montants de dossier. Il est impératif de les régler en même temps et de la même façon.

Chaque système est composé d'une vis et d'un écrou.

Pour faire le réglage :

- desserrez à fond les 2 écrous.

- vissez à fond la vis de gauche.

- déterminez votre réglage avec la vis de droite et bloquez son écrou.

- dévissez la vis de gauche jusqu'à venir en contact avec le châssis et bloquez son écrou.

Sur les modèles disposant d'un verrou de dossier, une fois la bonne inclinaison trouvée, il faut ajuster les verrous.

Desserrez les vis situées en arrière des verrous puis faites les tourner jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent et bloquent le dossier correctement.

### f. Essieu

La position de l'essieu est réglable à volonté d'avant en arrière (sauf U3 Light et X).

Pour faire le réglage :

- desserrez légèrement les 2 écrous de blocage.

- déplacez l'essieu et mesurez l'écart entre l'essieu et l'arrière du châssis des 2 côtés.

- resserrez les écrous.

Attention : la position de l'essieu doit être très exactement la même de chaque côté du châssis. Utilisez des clés de bonne qualité (grande marque) pour ne pas endommager les vis.

Sur le U3 Light et le X, défaire l'attache du dossier et le replacer à la position voulue.

### g. Freins

La position des freins est réglable à volonté d'avant en arrière.

Pour faire le réglage, utilisez une clé à 6 pans de 5mm (clé plate de 12mm pour le X). Un frein bien réglé doit s'enfoncer de 4mm à l'intérieur du pneu. N'utilisez pas un fauteuil roulant aux freins mal réglés et/ou aux pneus mal gonflés.

**Attention : les freins sont un dispositif de blocage à l'arrêt (type frein à main de voiture). Ils ne sont pas destinés à freiner dans les descentes.** Le freinage en descente doit se faire par les mains courantes. Utilisez éventuellement des mitaines en cuir pour vous protéger les mains (voir notre gamme de gants et mitaines Gill).

### h. Anti-bascules

Les personnes ne maîtrisant pas l'équilibre sur les roues arrière seulement doivent impérativement utiliser au moins une anti-basculé pour se protéger des chutes vers l'arrière. Les anti-basculés sont escamotables : poussez-les vers le bas pour les faire pivoter d'avant en arrière. Vérifiez que les anti-basculés dépassent largement des roues arrière.

Régalez-les si nécessaire grâce au bouton-poussoir de réglage.

La charge maximale d'une anti-basculé est de 75Kg. Si l'utilisateur et ses équipements pèsent plus de 75Kg, ou si le fauteuil a été équipé d'une motorisation, il faut impérativement une paire d'anti-basculés.

### i. Poignées et crochets de bras

Les fauteuils roulants Bambino et S2 (sauf U3 Light) peuvent être soulevés par leurs poignées, mêmes chargés de leur utilisateur.

Sur les fauteuils roulants U3 Light et X, n'utilisez jamais les crochets de bras ou les poignées pour soulever le fauteuil roulant chargé de son utilisateur, sauf si le fauteuil dispose des poignées pliantes et d'un dossier métallique. Soulevez TOUJOURS par la barre centrale du dossier, en plaçant une main à chaque angle de la barre.

Avec le fauteuil roulant Micro, n'utilisez jamais la poignée pour soulever le fauteuil roulant chargé de son utilisateur.

Prenez l'enfant dans les bras et réinstallez-le dans son fauteuil roulant une fois l'obstacle franchi.

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48	102 route de Versailles 91160 Champlan	Tel : 01.69.07.61.13 Fax : 01.64.46.25.48
TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400013   APE 3250A		TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400013   APE 3250A	



## Bon de garantie de votre fauteuil roulant PANTHERA

N° de série du fauteuil roulant :

Cachet du revendeur :

Date du bon de livraison PANTHERA :

Date limite de validité de la garantie :

Les fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison PANTHERA. Cette garantie est de 1 (un) an en dehors du territoire français. Les châssis des fauteuils roulants PANTHERA sont garantis 5 (cinq) ans.

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant PANTHERA (par exemple usure des pneus ou des bandages), ni une casse (volontaire ou non) qui ne soit pas directement liée à un défaut de fabrication ou de matériau.

Les pièces échangées au titre de la garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu'à la date limite de la garantie d'origine, si celle-ci est à plus de 6 mois.



---

### Partie à retourner complétée à Orthinea :

Nom de l'utilisateur :

Coordonnées :

Courriel :

N° de série du fauteuil roulant PANTHERA :

: Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea

102 route de Versailles 91160 Champlan	Tél. : 01 69 07 61 13 Fax : 01 64 46 25 48
TVA Intra. FR 87505076794   SIRET 50507679400013   APE 3250A	

[www.orthinea.com](http://www.orthinea.com)