



Loopwheels - Technische handleiding

Januari 2025

Alleen voor erkende dealers.

De details in deze handleiding hebben betrekking op Loopwheels Urban, Loopwheels Extreme en Loopwheels LT.



Inhoud

Algemene informatie..... Pagina 2

Contact opnemen over een probleem Pagina 3

Onbuigzaam is niet altijd goed Pagina 4

Onderdelen van een Loopwheeler Pagina 5

Reparaties door uzelf..... Pagina 7

Handleiding voor montage van lageradapters - Pagina 9

Handleiding voor vervangen van lagers - Pagina 10


Handleiding voor montage van duwvelgen: Urban en LT - Pagina 11

Handleiding voor montage van duwvelgen: Extremes - Pagina 12

Reparaties door Loopwheels Ltd..... Pagina 13

Veelgestelde vragen Pagina 14

Woordenlijst Pagina 16

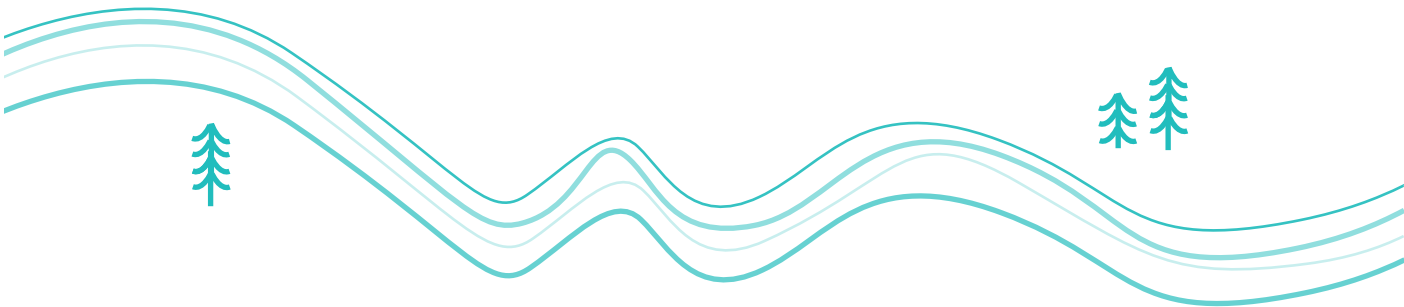

Algemene informatie

Raadpleeg altijd de [Gebruikershandleiding van Loopwheels](#) voor informatie over het gebruik. Deze Technische handleiding is bedoeld als naslagwerk voor de technische aspecten van Loopwheels om uw klanten extra after-sales service te kunnen bieden. Deze Technische handleiding **mag niet** aan eindklanten worden gegeven.

Type wiel	BSD (diameter van de hielzitting) (diameter van de velg)	Gewicht (zonder duwvelgen of banden)
Urban - 24 inch	540 mm	1,36 kg
Urban - 25 inch	559 mm	1,38 kg
LT	540 mm	1,36 kg
Extreme	507 mm	1,33 kg

- Loopwheels zijn verkrijgbaar in verschillende veerconstantes voor diverse veringsopties:
- Loopwheels Urban is verkrijgbaar in drie verschillende veerconstantes en twee wieldiameters
 - Loopwheels Extreme is verkrijgbaar in twee verschillende veerconstantes en één wieldiameter
 - Loopwheels LT is verkrijgbaar in één veerconstante en diameter, omdat deze alleen is ontworpen voor lichtere klanten.


De hoeveelheid compressie van elke veer wordt gemeten in Newton per vierkante mm (of N/mm²), ook wel megapascal genoemd. Dit is een meeteenheid.

U kunt hier de verschillende compressiesnelheden zien voor elke veer in elk wielmodel, in N/mm²:

	Onbuigzaam	Normaal	Zacht
Urban - 24 inch	116	85	70
Urban - 25 inch	112	80	65
LT			70
Extreme	115	95	

De diepere mountainbikeband (MTB-band) zorgt bij Loopwheels Extreme ook voor extra schokdemping en comfort, wat de stuggere veerconstante compenseert.

Er zijn kleine maar significante verschillen tussen elk model wiel, die de klant kan voelen en waarmee deze de optimale oplossing voor zijn of haar persoonlijke comfort kan kiezen.

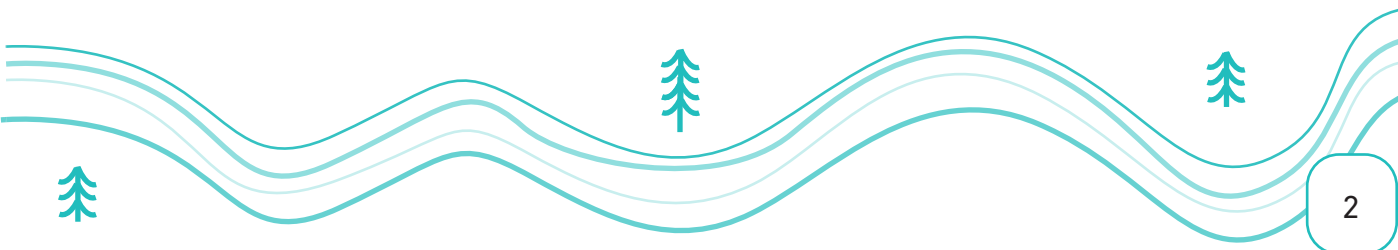

Contact opnemen over een probleem

We zijn voor alle Loopwheels-modellen beschikbaar voor after-sales advies. De mate waarin we kunnen helpen, hangt af van de informatie die u verstrekt.

Wat moet u ons vertellen als u contact met ons opneemt?

- Het SO-nummer of serienummer (te vinden op de binnenzijde van de naaf)*.
- Wat het probleem is.
- Een video/foto van het probleem.
- Wat deed de gebruiker toen deze het probleem opmerkte?

*Zonder het SO-nummer (Sales Order) of serienummer kan er vertraging optreden bij de beantwoording van het probleem.

De meest voorkomende reden voor klanten om contact met ons op te nemen is dat ze een geluid horen. Vaak wordt dit veroorzaakt door de verbinding tussen de velg en de duwvelg. Dit moet als eerste worden gecontroleerd. Draai eventuele losse schroeven aan voordat u verder advies inwint.

Voorwaarden voor retourneren

- Er geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden bij het verkooppunt voor het bedrijf dat de wielen bij ons heeft gekocht.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (zoals lagers, banden en binnenbanden) vallen niet onder de garantie.
- De klant is verantwoordelijk voor het terugsturen van de wielen voor reparatie en eventuele kosten. Wij organiseren de terugzending na reparatie.

Loopwheels wiebelen/draaien in de vorm van een 8.

- Loopwheels zijn een veersysteem, dus u zult merken dat ze anders zijn dan onbuigzame spaakwielen.
- Loopwheels hebben meer zijdelingse beweging en een meer op- en neerwaartse beweging. Dit is geen fout, maar een vast deel van het ontwerp dat ervoor zorgt dat het veersysteem kan worden geactiveerd.


- We staan een tolerantie van 5 mm toe.
 - » De tolerantie heeft betrekking op de hoeveelheid zijwaartse beweging die Loopwheels mogen hebben. Alle Loopwheels hebben een bepaalde mate van zijwaartse beweging en zullen nooit helemaal recht lopen.

Onbuigzaam is niet altijd goed...

Loopwheels werken niet alleen als wielen, maar zijn ook een veersysteem, wat betekent dat u zult merken dat ze anders zijn dan onbuigzame spaakwielen.

Loopwheels hebben meer beweging, zowel zijwaarts als op en neer. Dit is geen fout en verandert niet tijdens het gebruik. De bewegingen maken deel uit van het unieke ontwerp en brengen veel voordelen met zich mee.



Er is nog steeds een markt voor spaakwielen, vooral als u meestal over gladde oppervlakken gaat en lichtgewicht wielen wilt. Maar als u zich gemakkelijker en met minder pijn op elke ondergrond wilt voortbewegen, en meer comfort en minder trillingen wilt ervaren, zijn Loopwheels iets voor u.

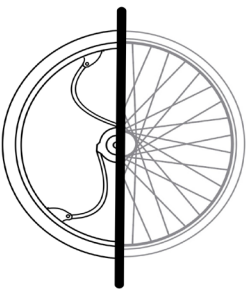

Profiel vanaf de voorkant gezien

De voordelen van Loopwheels t.o.v. onbuigzame spaakwielen


LOOPWHEELS	SPAAKWIELEN
• Uitstekende ophanging • Meer comfort • Minder impact op het lichaam • Minder vermoeidheid • Betere pijnbeheersing • Minder trillingen • Gemakkelijk bewegen op oneffen oppervlakken	• Uitstekend op gladde oppervlakken • Lichtgewicht • 100% recht binnen een marge van 0,5 mm (5 mm voor Loopwheels) • Oncomfortabel bij langdurig gebruik • Kan pijn in de onderrug veroorzaken • Trillingen kunnen van invloed zijn op blaasbeheersing en spasmen • Geen vering of bescherming tegen stoten


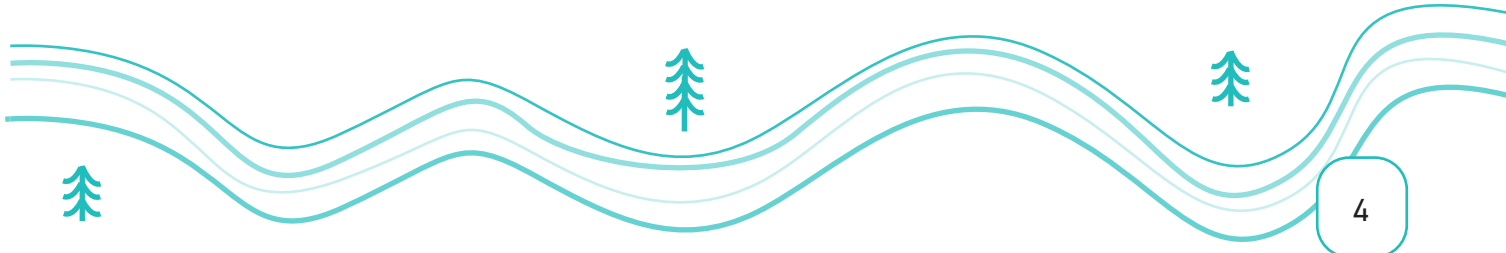
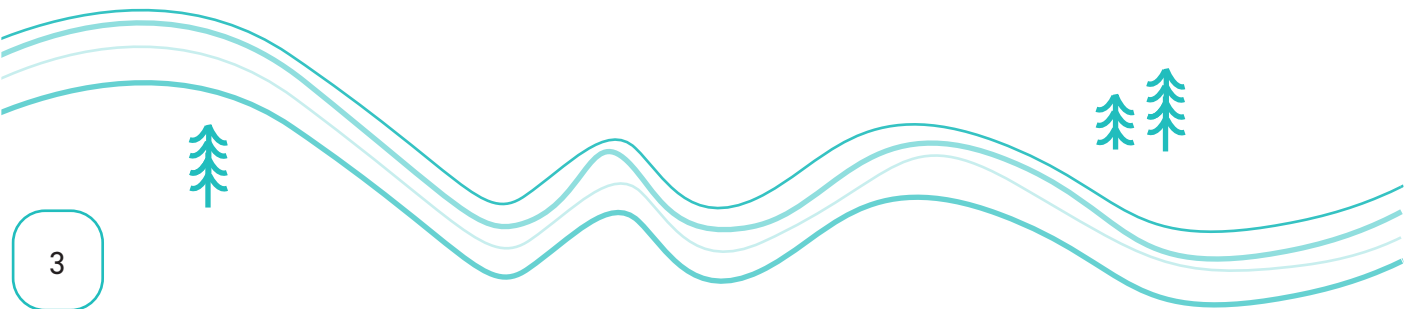


Onderdelen van een Loopwheer

Getoonde aantallen per wiel.

*Zie Woordenlijst op pagina 16 voor onderdeelnummers.

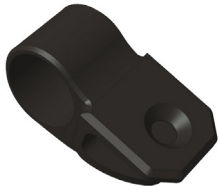Velg x1	
	Dubbelwandig aluminium. Geproduceerd in 3 maten: 24 inch/540 mm, 25 inch/559 mm, Extreme/507 mm. Breedte van binnenvelg 16 mm
Velgscharnierhouder x3	
	Verkrijgbaar in zwart en 4 verschillende kleuren. Bevestigd aan de velg waarin de veer en het scharnier zijn bevestigd.
Velgscharnier x3	
	Verkrijgbaar in zwart en 4 verschillende kleuren. Bevestigd aan de veer om aan te sluiten op de velg (via de velgscharnierhouder).
Veer x3	
	Verkrijgbaar in zwart of 3 verschillende kleuren.

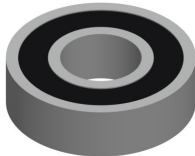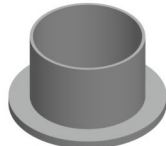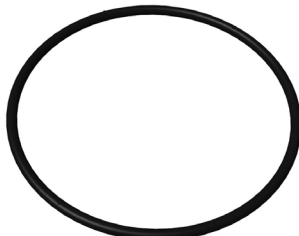Naaf x1		
	Verkrijgbaar in zwart of 4 verschillende kleuren.	
Naaflager x2		
	Buitendiameter 28 mm. Binnendiameter 1/2 inch (12,7 mm)	
Lageradapter x4		
	Voor het omzetten van de binnendiameter van lagers van 12,7 mm (1/2 inch) naar 12 mm.	
Duwvelg x1		
		Veel merken beschikbaar. Neem contact op met sales@loopwheels.com voor informatie.
Verstelling voor duwvelg x6		
	Beschikbaar voor Urban en LT: Smal (11 mm), Breed (19 mm). Alleen verkrijgbaar voor Extreme 15 mm.	

Reparaties door uzelf

Wat kunnen dealers doen?

Duwvelg vastdraaien

- De bouten die de duwvelg en de velg bij elkaar houden kunnen soms losraken, wat geluid kan veroorzaken omdat het materiaal van de velg of duwvelg tegen de aluminium buis van de verstelling van de duwvelg schuurt.

Let op: Bouten kunnen te vast worden aangedraaid, wat leidt tot een kapotte schroefdraad.

Informatie: Met Loctite 243 (blauw/middelsterk schroefdraadborgmiddel) kan de bevestiging worden versterkt door een kleine hoeveelheid met een wattenstaafje op de punt van de bout aan te brengen voordat u deze vastdraait.

Wijzigingen aan de lagers

- De lagers worden tijdens de montage in de naaf geperst.
- Dit zijn onderdelen die slijten en vallen dus **niet** onder de garantieovereenkomst.
 - Als een lager niet is versleten, maar wel loszit, kan het opnieuw worden gemonteerd met Loctite 638 (groen borgmiddel).
 - Als het lager versleten is en vervangen moet worden (u hoort een raspend geluid of draaien gaat niet soepel wanneer het lager met de hand wordt bewogen), moeten de richtlijnen voor het monteren van het lager worden gevolgd.
 - Lagerafmetingen: buitendiameter Ø 28 mm, binnendiameter ½ inch (12,7 mm)

Zie de handleiding Lagers vervangen op pagina 10, of [volg deze link naar video-instructies](#).

- Bij het monteren van lageradapters voor het omzetten van 1/2-inch (12,7-mm) lagers naar 12-mm lagers, moet er een aan beide zijden van het lager op beide wielen worden gemonteerd en op zijn plaats worden vastgezet met Loctite 638 (groen borgmiddel).

Zie de montagehandleiding voor lageradapters op pagina 9, of [volg deze link naar video-instructies](#).

Reparaties door uzelf (vervolg)

Wat kunnen dealers doen?

Een duwvelg vervangen

- Er zijn 2 soorten verstelmontagekits waarmee duwvelgen op Loopwheels kunnen worden gemonteerd.
- Het verschil zit hem in de manier waarop de duwvelgen aan de velg worden bevestigd: met een klinkmoer of met lipjes.
- Klinkmoer-duwvelgen kunnen op Loopwheels Urban of Loopwheels LT worden gemonteerd.
- Velglijpjes kunnen op Loopwheels Extreme worden gemonteerd nadat de lipjes op de juiste maat zijn gebogen.

1. Montagekits voor Urban en LT

- Verkrijgbaar in 2 maten: Smal (11 mm) en breed (19 mm)
- Voor klinkmoer-duwvelgen met een boutcirkeldiameter van 515 mm (wielen met een diameter van 24 inch) of 539 mm (wielen met een diameter van 25 inch).

Zie de montagehandleiding voor Urban- en LT-duwvelgen op pagina 11 of [volg deze link naar video-instructies](#).

2. Montagekits voor Extreme

- Verkrijgbaar in 1 maat: Standaard (15 mm)
- Voor lipvelgen met een lipafstand van 512 mm - lipjes buigen om op één lijn te komen met de boutgaten in de velg

Zie de montagegids voor Extreme duwvelgen op pagina 12 of [volg deze link naar video-instructies](#).

Opmerking: Vanwege de manier waarop de duwvelgen aan de velgen van de wielen worden bevestigd, moet u een aangepaste dopset gebruiken. Stuur een e-mail naar sales@loopwheels.com voor informatie.

Montagehandleiding voor lageradapters

Om 1/2-inch (12,7-mm) lagers om te zetten in 12-mm lagers.

2 adapters per wiel.

[Volg deze link voor video-instructies.](#)

Stap 1.



Leg het wiel plat en plaats één adapterhuls in het lager. Druk de huls vervolgens omlaag tot deze gelijk ligt met het lager. Er kan een kleine hoeveelheid groen borgmiddel (bijvoorbeeld Loctite 638) worden aangebracht voor een stevigere montage.

Stap 2.



Draai het wiel om en herhaal het proces.

Stap 3.

Herhaal dit met het tweede wiel.

Handleiding voor vervangen van lagers

Hoe verwijder en vervang ik lagers in Loopwheels?

[Volg deze link voor video-instructies.](#)

Stap 1.



Verwarm de metalen naaf rond het lager met een standaard warmtepistool. Hierdoor zet het metaal uit en wordt de schroefdraadborging van het lager zacht. *Probeer het lager niet te verwijderen zonder eerst de naaf te verwarmen.*

Stap 2.



Verwijder het eerste lager met een lagertrekker (intern). Als u geen gereedschap hebt zoals hierboven beschreven, kunt u het lager verwijderen door het onderste lager met een pons en een hamer door het gat in het bovenste lager naar buiten te slaan.

Stap 3.



Als beide lagers zijn verwijderd, reinigt u de oppervlakken van de lagerzittingen met alcohol.

Breng een nieuwe laag Loctite 638 aan voordat u de nieuwe lagers plaatst.


Handleiding voor montage van duwvelgen: Urban en LT

Opmerking: Bouten vastgedraaid tot 6 Nm

Opmerking: Klinkmoer-duwvelgen - boutcirkeldiameter van 515 mm voor 24-inch wielen, boutcirkeldiameter van 539 mm voor 25-inch wielen.


[Volg deze link voor video-instructies.](#)

Stap 1.

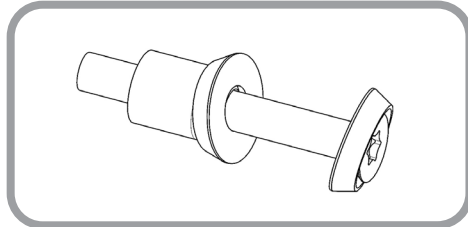


Plaats een metalen ring op de afstands-bout van de duwvelg, plaats deze door de velg en monteer een andere metalen ring en afstandshouder van de duwvelg. Zorg ervoor dat de kop van de bout van de stoel af wijst. Doe dit voor alle 6 bouten. Voor een betere bevestiging brengt u een kleine hoeveelheid borgmiddel 243 aan op de punt van de bout voordat u deze vastzet.

Stap 2.

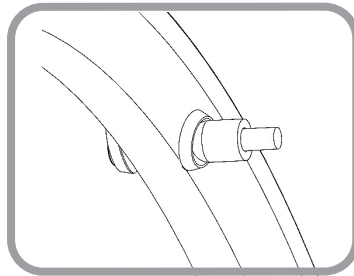

Draai één schroef gedeeltelijk vast in de duwvelg en herhaal dit met de tegenoverliggende schroef om ervoor te zorgen dat de duwvelg correct wordt uitgelijnd met de velg. Doe dit voor alle 6 bouten.

Stap 3.

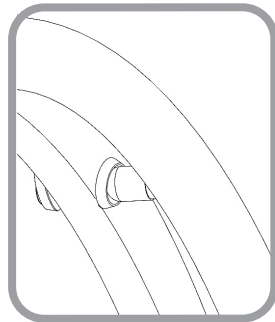

Draai alle montageschroeven van de duwband vast tot de duwvelg stevig op zijn plaats zit.


Handleiding voor montage van duwvelgen: Extreme

Opmerking: Bouten vastgedraaid tot 4 Nm

Opmerking: lipafstand van 512 mm met gebogen lipjes.


[Volg deze link voor video-instructies.](#)

Stap 1.

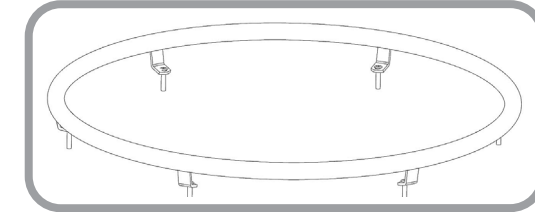



Duw een bout door elk gebogen lipje van de duwvelg. Zorg ervoor dat de kop van de bouten naar buiten wijst (weg van de stoel).

Stap 2.

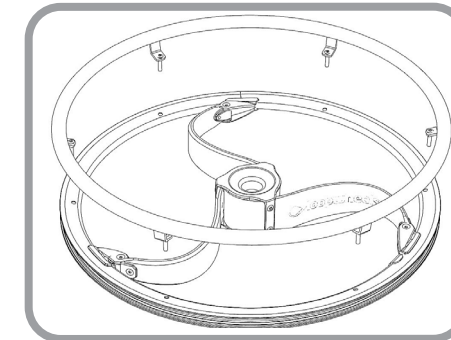

Breng de bouten op één lijn met elk van de velg-gaten op het Loopwheer en duw ze erdoor.

Stap 3.

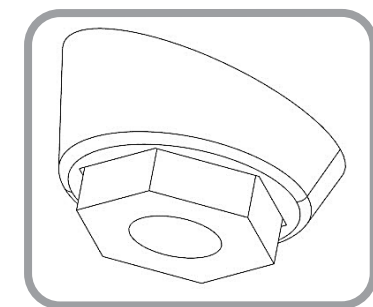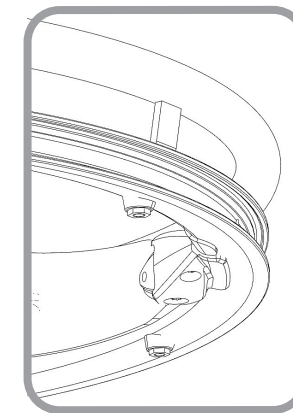

Gebruik gereedschap om de moeren stil te houden en draai elke bout in de bijbehorende moer (x6). De moeren moeten in een behuizing zitten waarin ze gelijk liggen met de binnenrand van het Loopwheer. Zitten ze los, duw de moer dan terug in de houder. Zorg ervoor dat de driehoekige zijde van de moer uit de houder wijst.

Reparaties door Loopwheels Ltd.

Tijdens de ontwikkeling van Loopwheels Urban, Loopwheels Extreme en Loopwheels LT zijn de wielen getest op duurzaamheid, sterkte en schokbestendigheid.

Dat wil echter niet zeggen dat Loopwheels nooit hoeven te worden gerepareerd. Zoals elk technisch onderdeel moeten ze wel regelmatig worden onderhouden. Raadpleeg de [Gebruikershandleiding van Loopwheels](#) voor een aanbevolen onderhoudsschema.


Loopwheels Ltd. kan de volgende reparaties uitvoeren:

- Velg vervangen
- Velgscharnier vervangen
- Lager vervangen
- Duwvelg vervangen
- Losse onderdelen opnieuw verlijmen (bijvoorbeeld velgscharnierverbinding bij velg, scharnierasbouten).

De belangrijkste indicatie voor een probleem is een krakend of klikkend geluid wanneer het wiel rolt. De eenvoudigste manier om te controleren of dit de oorzaak van het probleem is, is door de duwvelg van het wiel te verwijderen en te controleren of het geluid nog steeds optreedt.

Als u het geluid nog steeds hoort nadat de duwvelg is verwijderd, weten we dat het wiel naar ons moet worden teruggestuurd voor een volledige inspectie en reparatie of indien nodig, vervanging.

Bij sommige dealers zijn meer complexe reparaties mogelijk als Loopwheels Ltd onderdelen en instructies stuurt.
Uw technische/serviceteam moet contact opnemen met sales@loopwheels.com voor informatie.

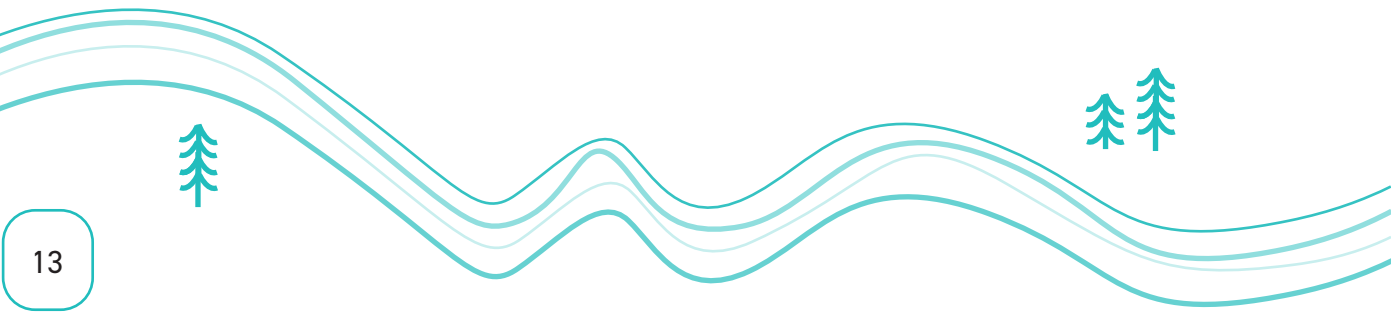

Veelgestelde vragen

Waarom heeft Loopwheels Extreme een andere montageset voor duwvelgen?

- Loopwheels Extreme is anders dan andere Loopwheels, omdat deze een kleinere diameter heeft. De velg heeft een BSD (diameter van de hielzitting) van 507 mm, wat betekent dat het een 22-inch velg is. Extreme wordt een 24-inch wiel wanneer diepe banden op de velg worden gemonteerd zodat de totale diameter 24 inch is.
- Om ervoor te zorgen dat de duwvelgen op de juiste lengte voor uw armen worden geplaatst, worden de lipbevestigingen op een standaard duwvelg met 6 lipjes (512 mm afstand tussen de lipjes) gebogen, zodat de gaten op één lijn liggen met die op de velg. Dit betekent dat de verstelkit anders moet zijn dan de Urban en LT verstelkit.

Welke banden kan ik op mijn Loopwheels zetten?

- Voor Loopwheels Urban in 24-inch en 25-inch uitvoering en Loopwheels LT kunnen we Schwalbe Marathon Plus-banden met SmartGuard leveren.
- Voor Loopwheels Extreme kunnen we Schwalbe Marathon Plus-banden met SmartGuard of Schwalbe Smart SAM-mountainbikebanden leveren.

Type wiel	ETRTO-code
Urban 24 inch (Marathon Plus-band 24x 1.00)	25-540
Urban 25 inch (Marathon Plus-band 25x 1.00)	25-559
LT (Marathon Plus-band 24x 1.00)	25-540
Extreme (Marathon Plus-band)	47-507
Extreme (Smart SAM-band)	54-507


Er zijn andere merken en modellen banden beschikbaar en compatibel met Loopwheels, maar Loopwheels Ltd. levert deze niet.

Het is belangrijk om te weten dat de rolweerstand, het risico op lekrijden en de trillingsdamping kunnen variëren en afhankelijk zijn van het type band. Bijvoorbeeld:

- Diepere banden, zoals die van Loopwheels Extreme, hebben meer trillingsdamping, maar door hun grotere oppervlak hebben ze een hogere rolweerstand.
- Marathon Plus-banden hebben SmartGuard, om de kans op lekrijden te verkleinen.

Als u banden van andere merken of modellen op Loopwheels monteert, moet u ervoor zorgen dat het tweede deel van de ETRTO-code van de band overeenkomt met de BSD van de velg (te vinden aan het begin van deze handleiding en in de Loopwheels-productfolders)

» Raadpleeg de gebruikershandleiding van Loopwheels voor richtlijnen over speling.

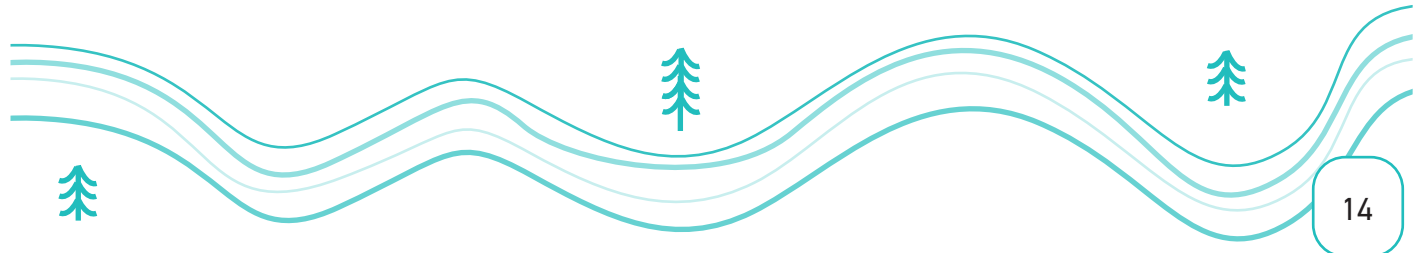

Kan ik het formaat van mijn Loopwheels wijzigen?

U kunt de maat van uw wielen niet meer veranderen nadat ze eenmaal zijn gemonteerd. U kunt de maat echter groter maken door een diepere band te monteren.

Gebruik ETRTO 37-540 voor 24-inch tot 25-inch Urban of LT

Gebruik ETRTO 40-559 voor 25-inch tot 26-inch Urban

Gebruik ETRTO 55-507 voor 24-inch tot 25-inch Extreme

Stuur een e-mail sales@loopwheels.com voor meer informatie.

Kan ik massieve banden monteren op mijn Loopwheels?

Loopwheels **geeft geen garantie** bij gebruik van massieve banden. Loopwheels zijn ontworpen om schokken beter te absorberen en het gebruik van massieve banden is hetzelfde als het gebruik van leeggelopen luchtbanden.

Het zorgt voor extra druk op de Loopwheels, waardoor ze minder comfort bieden en de slijtage van de Loopwheels wordt verhoogd, waardoor het risico van reparaties toeneemt.

Waarom kan ik de schroeven van mijn duwvelg niet aandraaien?

Door het ontwerp van Loopwheels Urban en Loopwheels LT moet elke duwvelg met klinkmoeren worden gemonteerd, waarbij schroeven en afstandshouders worden gebruikt om de velg en duwvelg aan elkaar te bevestigen. Deze verbinding wordt verder versterkt door loctite aan te brengen op de schroefdraad.

Het kan verleidelijk zijn om deze schroeven te blijven 'aandraaien', maar tenzij de schroef echt is losgekomen, zal dit ervoor zorgen dat de klinkmoer loskomt van de duwrand. Dit is niet meer te repareren. Er is dan een vervangende duwvelg nodig. Raadpleeg hoofdstuk 8 van de gebruikershandleiding voor onderhoudsaanbevelingen (en hoe vaak schroeven moeten worden gecontroleerd) [Gebruikershandleiding van Loopwheels](#).

Ik moet mijn Loopwheels terugsturen. Wat moet ik doen?

Pak uw Loopwheels zo goed mogelijk in om ervoor te zorgen dat de wielen tijdens het transport beschermd zijn. Bubbeltjesplastic, opvulmateriaal of een wieltas kunnen extra bescherming bieden. Doe een briefje in de doos met een korte beschrijving van het probleem en het inkoopordernummer van toen de wielen werden gekocht.

Woordenlijst

Onderdelen alfabetisch gerangschikt op onderdeelnaam.

Duwvelg

- 24W00BA00000 (24 inch Urban/LT)
- 25W00BA00000 (25 inch Urban)
- 24WX00BA00000 (Extreme)

Hub

- LW-003-033 (zwart)
- LW-003-033-BL (blauw)
- LW-003-033-GR (groen)
- LW-003-033-PU (paars)
- LW-003-033-RD (rood)

Lageradapter

- LW-002-095 (1/2 inch/12,7 mm tot 12 mm)

Naaflager

- LW-003-037 (1/2 inch/12,7 mm)

Velg (wiel)

- LW-003-049 (Urban 24 inch/ LT)
- LW-003-051 (Urban 25 inch)
- LW-003-007 (Extreme)

Velgscharnier

- LW-003-046 (zwart)
- LW-003-046-BL (blauw)
- LW-003-046-GR (groen)
- LW-003-046-PU (paars)
- LW-003-046-RD (rood)

Velgscharnierhouder

- LW-003-044 (zwart)
- LW-003-044-BL (blauw)
- LW-003-044-GR (groen)
- LW-003-044-PU (paars)
- LW-003-044-RD (rood)

Verstelling voor duwvelg

- 0W000N0000 a (smal, klinkmoeren)
- 0W000W0000 a (breed, klinkmoeren)
- 0WX000S0000a (standaard, Extreme,

Woordenlijst

Vervolg

Veer

- LW-003-001A (24 inch Urban, zacht, zwart)
- LW-003-001B (24 inch Urban, normaal, zwart)
- LW-003-001C (24 inch Urban, onbuigzaam, zwart)
- LW-003-001D (LT, zwart)
- LW-003-042B (Extreme, normaal, zwart)
- LW-003-042C (Extreme, onbuigzaam, zwart)
- LW-003-055A (25 inch Urban, zacht, zwart)
- LW-003-055B (25 inch Urban, normaal, zwart)
- LW-003-055C (25 inch Urban, onbuigzaam, zwart)
- LW-003-061A (24 inch Urban, normaal, blauw)
- LW-003-061B (24 inch Urban, normaal, paars)
- LW-003-061C (24 inch Urban, normaal, rood)
- LW-003-062A (24 inch Urban, zacht, blauw)
- LW-003-062B (24 inch Urban, zacht, paars)
- LW-003-062C (24 inch Urban, zacht, rood)
- LW-003-063A (24 inch Urban, onbuigzaam, blauw)
- LW-003-063B (24 inch Urban, onbuigzaam, paars)
- LW-003-063C (24 inch Urban, onbuigzaam, rood)
- LW-003-065A (Extreme, normaal, blauw)
- LW-003-065B (Extreme, normaal, paars)
- LW-003-065C (Extreme, normaal, rood)
- LW-003-066A (Extreme, onbuigzaam, blauw)
- LW-003-066B (Extreme, onbuigzaam, paars)
- LW-003-066C (Extreme, onbuigzaam, rood)
- LW-003-067A (25 inch Urban, zacht, blauw)
- LW-003-067B (25 inch Urban, zacht, paars)
- LW-003-067C (25 inch Urban, zacht, rood)
- LW-003-068A (25 inch Urban, normaal, blauw)
- LW-003-068B (25 inch Urban, normaal, paars)
- LW-003-068C (25 inch Urban, normaal, rood)
- LW-003-069A (25 inch Urban, onbuigzaam, blauw)
- LW-003-069B (25 inch Urban, onbuigzaam, paars)
- LW-003-069C (25 inch Urban, onbuigzaam, rood)

We hopen dat deze gids nuttig is voor onze erkende dealers. Suggesties over hoe we u kunnen helpen zijn welkom. Neem hiervoor contact op met sales@loopwheels.com of bel ons om uw vragen te bespreken!

Loopwheels Ltd.
Unit 202 Boughton Industrial Estate,
Boughton, Newark, Nottinghamshire
NG22 9LD, Verenigd Koninkrijk

Neem contact op met het
verkoopteam:
E-mail: sales@loopwheels.com
Tel.: +44 (0) 1623 860909

Web: www.loopwheels.com